


MNCHIP

PRACOVNÍ POSTUP

- Z chladničky vyjměte zabalený reagenční disk.
- Stiskněte tlačítko (**Analysis**) zvolte typ vzorku. **Naskenujte QR kód reagenčního disku a ověřte si, že se jedná o správné vyšetření.** Zvolte druh zvířete.
- Odeberte a připravte si vzorek.
- Vyjměte z obalu reagenční disk a neprodleně jej použijte. Nejdéle do 20 minut od vybalení.
- Pomocí špičky a **100 µl pipety** naplňte prostor pro vzorek v disku **červeně označeným otvorem**.
- Jedná-li se o typ reagenčního disku vyžadující přidání ředícího činidla, tak pomocí **430 µl pipety** naplňte prostor pro ředidlo v disku bíle označeným otvorem destilovanou vodu.
- Jedná-li se o typ reagenčního disku, který již ředidlo obsahuje, tak dle návodu zobrazenému na displeji utržením odstraňte uzávěr ze zásobníku ředila, čímž se ředidlo uvolní do disku.
- Odstraňte modrý ochranný film na disku.
- Vložte disk do vysunuté zásuvky a jemně nacvakněte výčnělky na disku do otvorů na držáku disků. Stiskněte tlačítko (**Close**). Analýza začíná ve chvíli, kdy se zásuvka s diskem zasune zpět do přístroje.
- Vložte identifikační číslo pacienta a věk pacienta (je vyžadováno) a potvrďte tlačítkem (**Next**). Případně doplňte další informace o majiteli a pacientovi. Pokračujte tlačítkem (**Next**).
- Celá analýza trvá < 7 minut a po dokončení se výsledky analýz uloží do paměti přístroje a automaticky se vytisknou.

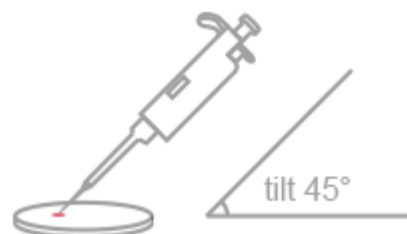

MNCHIP

MNCHIP Technologies Co., Ltd
No.19 Xinhuan Road West, TEDA,
Tianjin, 300457, China
sales@mnchip.com
www.mnchip.com

inlab
medical

Kostelec u Křížků 275, 251 68
Tel./Fax: (+420) 222 721 023, 222 721 025, 222 721 032
e-mail: inlab@inlab.cz
www.inlab.cz
ČSN EN ISO 9001:2001