


PRACOVNÍ POSTUP

- Detailní informace naleznete v příručce uživatele analyzátoru **Piccolo**.
- Z chladničky vyjměte zabalený reagenční disk a nechte jej vytemperovat na laboratorní teplotu.
- Odeberte vzorek.
- Vyjměte z obalu reagenční disk. **Disk použijte do 20-ti minut.**
- Nasadte špičku na pipetu a fixním objemem 100 μ l nasajte vzorek heparinované krve, séra či plasmy a aplikujte do otvoru v disku označeným šipkou (Obr. 1). **Neaplikujte více než 120 μ l vzorku do disku (Obr. 2).**



Obr. 1

- Stiskněte tlačítko (**Analyze**) otevře se zásuvka. Do kruhového otvoru v zásuvce uložte disk. Stiskněte tlačítko (**Close**). Analýza začíná ve chvíli, kdy se zásuvka s diskem zasune zpět do přístroje.

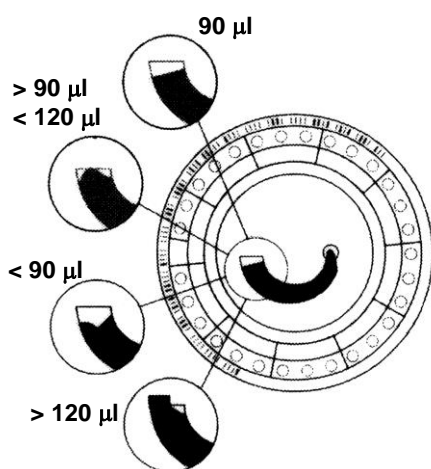

Obr. 2

- Vložte identifikační čísla pacienta a potvrďte tlačítkem (**Done**).
- Celá analýza trvá < 15 minut a je ukončena ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí nápis „ANALYSIS COMPLETE”.
- Výsledky analýz se ukládají do paměti přístroje a automaticky se vytisknou na vložený kotouček termopapíru.
- Zásuvka se otvírá po skončení analýzy a tisku automaticky. Po otevření zásuvky vyjměte použitý disk.



- Analyzátor **Piccolo** je nyní připraven zpracovat další vzorek.